


STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ


Karty pro rychlé testování antigenu 2019-nCoV ze slin
(Imunochromatografie)

POŽADAVKY NA VZOREK

- 1** Vložte houbičku na konci výtěrového tampónu do úst. Aktivně otírejte vnitřek úst a jazyka po dobu 90 sekund, abyste nasbírali ústní tekutinu.

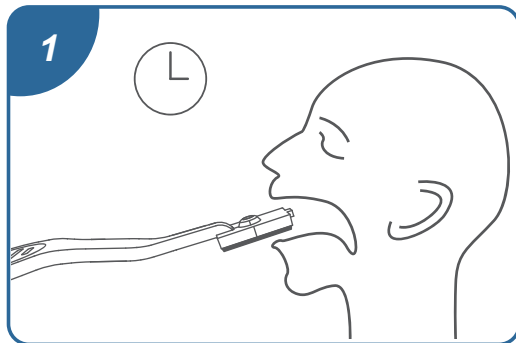


- 2** Jakmile je houbička plně nasycená a indikátor zmodrá, vyjměte výtěrový tampón z úst.

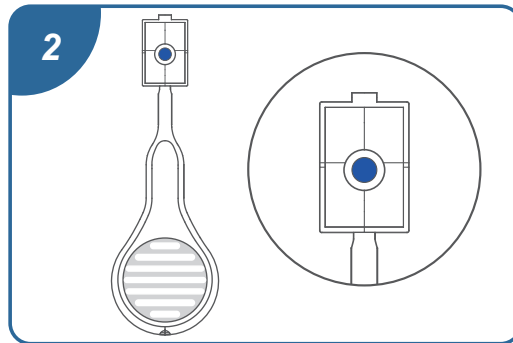

- POZNÁMKA:**
1. Nejezte ani nepijte 2 hodiny před testem.
 2. Při odběru tampón jemně držte v ústech a nechte houbičku přirozeně nasáknout slinami.
 3. Nestlačujte houbičku jazykem a nekousejte do ní.
 4. K testování je vhodný jakýkoli vzorek slin, ale doporučuje se vzorek slin odebraný ráno před vypláchnutím úst, jídlem nebo pitím.


POSTUP PROVEDENÍ TESTU

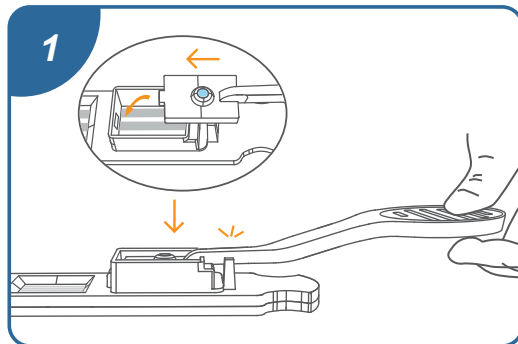

Vložte výtěrový tampón s odebraným vzorkem do držáku testovací karty a zatlačte směrem dolů.

Pozn.: Výčnělek na konci tampónu vložte do otvoru v držáku testovací karty.

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ TESTU

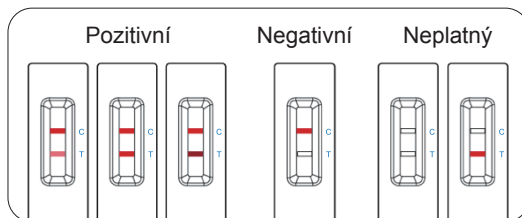

Výsledek odečtete po 15 minutách. Odečtení výsledku po méně než 15 minutách může vést k falešně negativnímu výsledku. Odečtení výsledku po více než 15 minutách může vést k falešně pozitivnímu výsledku.

No.: DC-QI-0589C01 Ver 1.1
Rel.:2020/12/05



Guangzhou Decheng Biotechnology Co., LTD
Room 218, Building 2, No.68, Nanxiang Road, Science City,
Huangpu District, 510000, Guangzhou P.R.China

TEL: +86-020-82557192 / Email: service@dochebio.com / www.dochebio.com

**Exkluzivní dovoz a distribuce
pro ČR a SR:**
QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o.
Korytná 47, 100 00 Praha 10
Česká republika

Informace a objednávky:
info@quickseal.eu
+420 273 167 580
www.quickseal.eu
facebook quickseal.eu



QuickSeal